


INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

## THERMO CLEAR

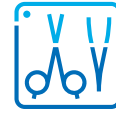

SPEZIALKLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKENAUTOMATEN

1 / 3

Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen  
Fördert eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts  
Schaumarm



## INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

# THERMO CLEAR



## PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

**THERMO CLEAR** ist geeignet zur sauren thermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es erzielt eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist schaumarm eingestellt. **THERMO CLEAR** ist biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

## ANWENDUNGEN UND HINWEISE

### Anwendungsgebiete

THERMO CLEAR ist geeignet für thermisch spülende Steckbeckenspülen gängiger Hersteller. Nicht anwenden in nicht-thermischen und nicht-säurebeständigen Steckbeckenspülen.

### Dosierung

0,1 - 0,3 % (bzw. 1 - 3 ml/L), je nach Automatentyp und Wasserhärte (siehe Herstellerangaben). Zudosierung erst ab 30 °C. Dosierung durch Fachpersonal durchführen.

### Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMO CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen. Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-säurebeständige Steckbeckenspülen geeignet. THERMO CLEAR darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.

### Zusammensetzung

Organische Säuren < 30 %, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren.

### Materialverträglichkeit

Das Produkt ist kompatibel mit allen gängigen Metallen und Kunststoffen in der Steckbeckenaufbereitung, wie z. B. Edelstahl oder Polypropylen (PP).

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

### Vor Gebrauch Etikett lesen.

## INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

# THERMO CLEAR



## GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
THERMO CLEAR	Kanister	3	5 L	00-127-050AT
	Flachkanister	3	5 L	00-127-050
	Kanisterdosierpumpe	3	2 L/5 L/10 L	00-906-000-01
	Kanisterumfüllhahn	3	2 L/5 L/10 L	00-907-000
	Kanisterschlüssel	3		00-909-050

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



## ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.